

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

*Professzionális felhasználásra
fejlesztett POC antigén gyorseszteszt*



SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

Nincs szükség készülékre

Roche (Magyarország) Kft.
Diagnosztika Divízió
2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel.: 06-23-446-886
Fax: 06-23-446-890

www.roche.hu

MC-HU-00092

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

*Professzionális felhasználásra
fejlesztett POC antigén gyorseszteszt*

- A SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test egy gyors, kromatográfias immunkémiai vizsgálati eljárás, amely a humán orrgaratban jelen lévő SARS-CoV-2 specifikus antigének kvalitatív kimutatására használható.
- Mintatípus: orrgarati kenet.
- Nincs szükség készülékre a teszt elvégzéséhez.
- 15-30 percen belül eredmény.
- Rendkívül egyszerű használat.
- Vizsgálati eljárás célja a SARS-CoV-2 vírus-specifikus antigén kimutatása feltételezett COVID-19 betegek esetén.

1 Mintagyűjtés



Orgarati kenetminta gyűjtéséhez helyezzenek be a beteg ornyúján keresztül egy steril kenetgyűjtő pálcát olyan mélyre, hogy elérjék a garat hátsó falát.

2 Minta előkészítése



Helyezzék a pálcát a mellékelt extrakciós puffercsőbe. Szorítsák össze a puffercsövet, miközben a pálcát több mint 5-ször megforgatják.

Vegyék ki a pálcát, miközben összeszorítják a csövet, hogy kiszorítsák a pálcából a folyadékot.

A zárókupakot nyomják rá szorosan a csőre.

A mintavétel után minél előbb el kell végezni a vizsgálatot.

3 Minta felvitele



Csőpöntsenek 3 csepp kivont mintát a vizsgálóeszköz mintatartójába.

4 Eredmény




15-30 perc múlva olvassák le a vizsgálati eredményt.

FIGYELMEZTETÉSI!

30 perc eltelte után a vizsgálati eredményt már nem szabad leolvasni, téves eredményt adhat!

Teszt kiértékelése

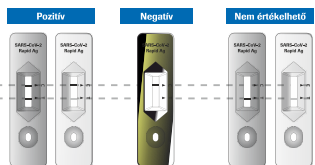

Minden esetben, ha a kontrollvonal nem jelenik meg, értékelhetetlen az eredmény.

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

*Professzionális felhasználásra
fejlesztett POC antigén gyorseszteszt*

Termékspecifikáció:

Teszt	Kiszerezés	Katalógusszám
SARS-CoV-2 Rapid Antigen test	25 teszt/doboz	09327592190
Kontroll	Kiszerezés	Katalógusszám
SARS-CoV-2 Antigen Control	10 pozitív- és 10 negatív kontroll /doboz	09338322190

In Vitro Diagnosztikai orvostechnikai eszköz, mely laboratóriumi és ágymelletti környezetben történő professzionális alkalmazásra készült.

Specifititás
99,68%

Szenzitivitás
96,52%

